



SAFESEPT^{MAX} Surface Disinfection non-alcoholic Spray

Schnelldesinfektion, alkoholfrei

- besonders gut geeignet für Acrylglas
- hoher Reinigungseffekt
- kurze Einwirkzeiten



Deutsch

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Alkoholfreies, gebrauchsfertiges Präparat zur Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar, Medizinprodukten sowie Flächen aller Art. Besonders für alkoholempfindliche Medizinprodukte und Flächen. Auf der Basis von quaternären Ammoniumverbindungen. SAFESEPT MAX® Surface Disinfection non-alcoholic Spray enthält keine Alkohole, Aldehyde und Phenole.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Gem. Medizinproduktegesetz (MPG): Desinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichen nichtinvasiven Medizinprodukten.

Gem. Biozidprodukte-Verordnung (BPR): Zur Desinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichen Flächen aller Art.

WIRKSPEKTRUM UND EINWIRKZEIT:

Flächendesinfektion (Wischdesinfektion) bakterizid, levurozid gem. VAH: 1 Min., wirksam gegen alle behüllten Viren gem. RKI Empfehlung inkl. HBV/HIV/HCV/Vaccinia/BVDV/Influenza-/Grippe-Viren: 30 Sek.

ANWENDUNG:


Zu desinfizierende Fläche vollständig benetzen und über die Dauer der Einwirkzeit feucht halten. Nach Ablauf der Einwirkzeit ggf. mit einem Einmaltuch nachwischen.

ZUSAMMENSETZUNG:

Zu desinfizierende Fläche vollständig benetzen und über die Dauer der Einwirkzeit feucht halten. Nach Ablauf der Einwirkzeit ggf. mit einem Einmaltuch nachwischen.

BESONDERER HINWEIS:

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

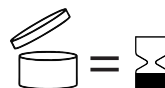



SAFESEPT^{MAX} Surface Disinfection non-alcoholic Spray

Schnelldesinfektion, alkoholfrei

- besonders gut geeignet für Acrylglas
- hoher Reinigungseffekt
- kurze Einwirkzeiten



Deutsch

LISTUNGEN / PRODUKTSTATUS:

- Aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste des VAH
- Registriert als Biozid-Produkt bei der baua (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) gem. Biozidgesetz: BAuA Reg.-Nr.: N-66700 / N-68706
- Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

DARREICHUNGSFORMEN:

- REF 988-2744** 1L Keulenflasche mit Sprühkopf
REF 988-2745 5L Kanister

ZUBEHÖR:

- REF 979-6277** Sprühkopf für 1-Liter-Flasche
REF 979-6276 Kanisterumfüllhahn
REF 979-6278 Kanisterschlüssel
REF 979-6272 Dosierpumpe 5L Kanister