

Zuverlässige Desinfektion.

EuroSept® Xtra Instrumentendesinfektion Konzentrat



WERT & QUALITÄT



ZUVERLÄSSIG & VERTRAUENSWÜRDIG



PRODUKTAUSWAHL

EuroSept® Xtra Instrumenten- desinfektion Konzentrat



Vorteile

- > Begrenzt viruzid
- > Geeignet für das Ultraschallbad
- > Aldehyd- und phenolfrei
- > Nicht-korrosive Formel mit sehr guter Materialverträglichkeit
- > Konzentrierte Formel für weniger Verpackung und mehr Nachhaltigkeit

Gebrauchsanweisung

Zur einfachen Wiederaufbereitung von Instrumenten vor der Sterilisation ist dieses Flüssigkonzentrat für die manuelle Desinfektion und Reinigung medizinischer Instrumente im Tauchverfahren mit einem umfassenden Wirkungsspektrum gegen Bakterien, Hefepilze und behüllte Viren bestimmt.

Physikalische Eigenschaften

| Bedingungen | Konzentration und Expositionszeit |
|--|-----------------------------------|
| Bakterien nach EN 13727, EN 14561 und VAH (schmutzige Bedingungen) | 1,5 % 15 Min. 1,0 % 60 Min. |
| Candida albicans nach EN 13624, EN 14562, VAH (schmutzige Bedingungen) | 1,5 % 15 Min. 1,0 % 60 Min. |
| Bakterien und Candida albicans in einem Ultraschallbad nach EN 14561 und EN 14562 (hohe Belastung) | 1,0 % 5 Min. |
| „Begrenzt viruzid“ (behüllte Viren wie HBV, HIV, HCV) nach DVV/RKI, EN 14476 und EN 17111 (hohe Belastung) | 1,5 % 15 Min. |
| TbB-Erreger und Mykobakterien (M. terrae und M. avium) nach EN 14348, EN 14563 (niedrige Belastung) | 4,0 % 30 Min. 3,0 % 60 Min. |

Inhaltsstoffe:

100 g enthalten: 4,4 g Didecyldimethylammoniumchlorid, 2,75 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

**EuroSept® Xtra Konzentrat zur
Instrumentendesinfektion**

2 L
5 L

Artikel-Nr. 9884863
Artikel-Nr. 9884864