



CyberTech
SAFE ST PLUS
INSTRUMENTEN-
DESINFEKTION
KONZENTRAT

Desinfizieren und schützen.

SAFE ST PLUS INSTRUMENTENDESINFEKTION KONZENTRAT

VORTEILE

- Breites Wirkungsspektrum
- Begrenzt viruzid
- Geeignet für Ultraschallbad
- Aldehyd- und phenolfrei
- Nicht-korrosive Formel mit sehr guter Materialverträglichkeit
- Konzentrierte Formel für weniger Verpackung und mehr Nachhaltigkeit



GEBRAUCHSANWEISUNG

Zur einfachen Wiederaufbereitung von Instrumenten vor der Sterilisation ist dieses Flüssigkonzentrat für die manuelle Desinfektion und Reinigung medizinischer Instrumente im Tauchverfahren mit einem umfassenden Wirkungsspektrum gegen Bakterien, Hefepilze und behüllte Viren bestimmt.

BEDINGUNGEN	KONZENTRATION UND EINWIRKZEIT
Bakterien nach EN 13727, EN 14561 und VAH (schmutzige Bedingungen)	1,5 % 15 Min. 1,0 % 60 Min.
Candida albicans nach EN 13624, EN 14562, VAH (schmutzige Bedingungen)	1,5 % 15 Min. 1,0 % 60 Min.
Bakterien und Candida albicans in einem Ultraschallbad nach EN 14561 und EN 14562 (hohe Belastung)	1,0 % 5 Min.
„Begrenzt viruzid“ (behüllte Viren wie HBV, HIV, HCV) nach DVV/RKI, EN 14476 und EN 17111 (hohe Belastung)	1,5 % 15 Min.
TbB-Erreger und Mykobakterien (M. terrae und M. avium) nach EN 14348, EN 14563 (niedrige Belastung)	4,0 % 30 Min.
INHALTSSTOFFE	
100 g enthalten: 4,4 g Didecylmethylammoniumchlorid, 2,75 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin	

SAFE ST PLUS INSTRUMENTENDESINFEKTION KONZENTRAT	2 L.....Artikel-Nr. 9884805	5 L.....Artikel-Nr. 9884806
---	-----------------------------	-----------------------------