

Bedienungsanleitung

Desinfektionsmittel- und Flüssigseifenspender SPE 500/SPE 1000 mit Bedienhebel und Einwegpumpe

Passend für die Flaschenformen aller wichtiger Desinfektionsmittel-Hersteller.

Vor der Montage beachten:

Packen Sie den Karton aus, entfernen Sie die Kunststoffverpackung des Spenders und achten darauf, dass folgende Teile enthalten sind:


- 1 Spender mit montierter Kunststoff-Einwegpumpe
- 1 Bedienhebel, der am Spender zu montieren ist
- 1 Wandplatte zur Wandmontage (nicht nötig, wenn bereits eine passende Rückwand vorhanden und montiert ist)
- 1 Tropfschale (zum Aufstecken nach der Spendermontage)
- 1 Beutel mit je einem Dreierset Schrauben und Dübel sowie einem Metallstreifen
- 1 Bedienungsanleitung deutsch

Hinweis: Vor Montage die Position des Spenders bestimmen

- Falls gewünscht, über einem Waschbecken anbringen (nicht notwendigerweise, weil Tropfschale integriert ist)
- Montagehöhe über einem Waschbecken: ca. 15 bis 20 cm (Unterkante Spender)
- Montagehöhe (Fußboden bis Unterkante Spender) an der Wand: ca. 120 cm
- Falls Spender in Fluren montiert werden: Montagehöhe so wählen, dass die Spender nicht durch Stationswagen u.ä. beschädigt werden können


Gebinde	Größe	Art. Nr.
SPE 500/1000		
Wandspender	500 ml	00-918-005
Wandspender	1 L	00-918-010
ESH-Adapter für SPE 500	500 ml	00-918-KOMB-01

Spender komplettieren

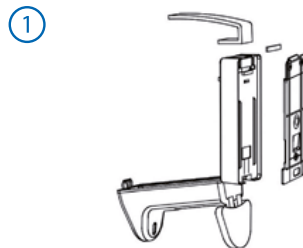

Der Spender wird aus Platzgründen mit demontiertem Bedienhebel geliefert. Zur Montage auf der Spenderrückseite den Bedienhebel einsetzen und eindrücken, bis er hörbar einrastet; den Metallstreifen einsetzen (dient zur Sicherung des Bedienhebels und gleichzeitig als oberer Befestigungspunkt des Spenders auf der Wandplatte).

Spendermontage

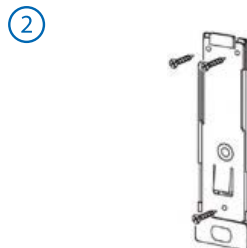


Wandplatte mit Dübeln und Schrauben befestigen (nicht notwendig, wenn Wandplatte bereits vorhanden). Spender von oben über die Wandplatte schieben, bis Verriegelungszunge hörbar einrastet.

Inbetriebnahme



Spender öffnen, dazu auf den Druckknopf oben unter dem Bedienhebel drücken (Abb. 2) und Deckel nach vorne klappen, Verriegelungszunge der Wandplatte durch die Aussparung in der Spender-Rückwand nach außen drücken, Wandplatte nach unten aus dem Gehäuse ziehen.

Dosierung

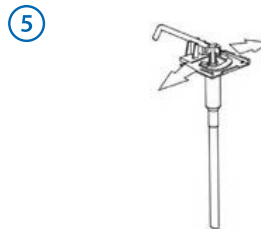

Die Spenderpumpe ist bei Lieferung auf die maximale Dosiermenge von 1,8 ml pro Hub eingestellt. Durch Verschieben der Dosiergabel nach rechts oder links lässt sich die Abgabemenge auf 1,2 ml bzw. 0,8 ml pro Hub reduzieren.

Reinigung des Spenders; Austausch der Pumpe

Der Spender ist grundsätzlich wartungsfrei, sollte aber aufgrund von Empfehlungen zur Infektionsvorsorge und Hygiene regelmäßig gereinigt und eventuell desinfiziert werden.

Das **Gehäuse** nur mit mildem Reinigungsmittel säubern, falls gewünscht, mit Flächen-Desinfektionsmittel nachbehandeln.

Das Gehäuse kann auch in einer geeigneten Spülmaschine gereinigt werden.

Die **Reinigung der Pumpe** empfehlen wir nicht, um die Entstehung von Hygienemängeln bei der Aufbereitung von vornherein zu vermeiden: Die Kunststoffpumpen sind als Einwegpumpen ausgelegt und können kostengünstig - eventuell sogar preisgünstiger als eine Aufbereitung wäre - als Ersatzteil bezogen werden. Die Pumpen sollten deshalb bei Bedarf getauscht und die gebrauchten Pumpen in geeigneter Weise entsorgt werden.

